

CaseSupport PÄÄN JA NISKAN TUKITYÖNY



VAKIOKOKO

30 x 30 x 8 cm



- Ainutlaatuinen aallotettu rakenne ehkäisee painehaavojen syntymistä takaraivon alueella
- Tukipalkeilla sivuttaistukea päälle
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- perinteinen vetoketju

MedicaseKS kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiivit saumat
- nestetiivis vetoketju

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet.
- Sisus on viskoelastista PU-geelivaahtoa.

TOIMIVUUS

- Suunniteltu käytettäväksi leikkaussaleissa, teho-osastoilla sekä vuodeosastoilla ehkäisemään painehaavojen syntymistä takaraivon alueella.
- Käytetään hoitotasoilla selinmakuuasennossa.
- Tyynyn malli myötäilee pään muotoa.
- Aallotettu, lämpöreaktiivinen geelivaahto muotoutuu pään mukaan, jolloin takaraivon kohdistuva paine jakautuu laajemmalle alueelle.
- Tukipalkit tukevat päätä ja vaikeuttavat pään liikkumista sivusuunnassa.
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Tyynyn sisukselle ei suositella vesipesua.
- Kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

