

# Mediresc PELASTUSPATJAT



**Suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa.**

- Kaikkiin MediMattress Oy:n patjamalleihin on saatavana kiinteä **Mediresc** pelastuspäällinen
- Liukuu niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa
- Ympäristöystävälliset ja täysin palamattomat materiaalit
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen
- Hyödyllisyysmalli No 8128

VAKIOKOOT (erikoiskoot mittilaustyönä)		
Leveys cm 75/78/80/ 85/88/90	Pituus cm 200/205/208/210	Korkeus cm 13/17



## MATERIAALIT

- Pohjassa on hyvin sekä kuivalla että kostealla alustalle liukuva, täysin nesteitä läpäisemätön polyuretaanisiveltä polyesteri.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet
- Palamattomat materiaalit.

## TOIMIVUUS

- Evakuointitilanteessa potilas kiinnitetään patjaan reunoista vedettävillä, pikalukollisilla hihnoilla.
- Kiinnityshihnat ovat vetoketjun tippaläpän alla piilossa ja kiinnityslenkkeihin pujotettuina, joten ylimääräisiä hihnoja ei roiku patjan sivuilla.
- Päällisen päädissä on tukevat pelastus/vetohihnat, jotka mahdollistavat evakuoinnin jopa yhden henkilön voimin.

## PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

## TAKUU

- Patjojen sisukset 2 tai 5 vuotta, päälliset 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

## PÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuattu
- Materiaali: alla polyuretaanisiveltä polyesteri, päällä polyuretaanilaminoitu polyamidi.

## PÄÄLLISEN PESU JA PUHDISTUS

- Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, jolloin riittävä huuhtelu ja kuivaus.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

