

# MedirescSafe PELASTUSPATJAT



**Suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa.**

- Kaikkiin MediMattress Oy:n patjamalleihin on saatavana potilasturvallinen, kiinteä **MedirescSafe** pelastuspäällinen
- Liukuu niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa
- Ympäristöystävälliset ja täysin palamattomat materiaalit
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

VAKIOKOOT		(erikoiskoot mittatilaustyönä)
Leveys cm	Pituus cm	Korkeus cm
75/78/80/ 85/88/90	200/205/208/210	13/17

**Hyödyllisyysmallisuoja nro 8698**



## MATERIAALIT

- Pohjassa on hyvin sekä kuivalla että kostealla alustalla liukuva, täysin nesteitä läpäisemätön polyuretaanisivelty polyesteri.
- Palamattomat materiaalit.

## TOIMIVUUS

- Evakuointitilanteessa potilas kiinnitetään patjaan reunoista vedettävillä, tarrallisilla kiinnityslinoilla.
- Kiinnityslinoille on päällisen pohjassa säilytystasku..
- Päällisen päädyissä on tukevat, lyhyet nosto/kantolenkit, jotka mahdollistavat evakuoinnin jopa yhden henkilön voimin.

## PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1 -luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

## TAKUU

- Patjojen takuu 2-5 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

## PELASTUSPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä.
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuattu.
- Materiaali: alla polyuretaanisivelty polyesteri, päällä polyuretaanilaminoitu polyamidi.

## PESU JA PUHDISTUS

- Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Patjan vaahdolle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.

