

MegaQ ASENTOHOITOTYYNY



VAKIOKOKO
27 x 80 cm

- Puolikuun mallinen asentohoitotyynty
- Käytetään niin makuu- kuin istuma-asennossakin
- Sopii erinomaisesti myös imetystyynyksi
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen



CE

MATERIAALIT

- Päällis- ja täytemateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiaminimaisuudet
- Durablend-täytesekoitus kestää hyvin toistuvaa laitospesua
- Päällinen: polyuretaanilaminoitu polyamidi
sisäpussi: 100 % puuvilla, täyte: 75 % polyuretaani, 25 % polyesteri

TOIMIVUUS

- Tyynyn kaareva muoto ja tukeva rakenne tarjoavat eri käyttömahdollisuuksia, ergonomiaa sekä turvallisuuden tuntua käyttäjälle
- Soveltuu esim. liukumisen estoon, raajojen kohohoitoon sekä asennon tukemiseen ja korjaamiseen
- Täytteen määrä säädettävissä
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat

MedicaseKS kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojaus
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, jolloin riittävä huuhtelu ja kuivaus.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.
- Sisäpussi täyteen voidaan pestä +70 asteessa.

