

# MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA

Tyynyssä on neljä pituussuuntaista kennoa. Patentoimamme rakenteen ansiosta, käyttötarkoituksesta riippuen, tyynyn kennoja voidaan tukevoittaa tai keventää lisäämällä tai vähentämällä täytettä.

Sisätyynyn päädyssä on vetoketju mahdollista täytteiden käsittelyä varten. Vetoketjun avaamalla avautuu samalla kaikkien neljän eri kennon päät.



Ylävartalon tukemiseen.



Jalan kohohoitoon.



Psoas-tyynynä.



Kylkiasentohoidossa ylävartalon ja käden tukena.



# MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA

Säädettävä MegaHemi soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin asentohoidossa. Nimensä mukaisesti se on tarkoitettu hemipotilaille, mutta myös vanhuksille, lonkkaleikatuille ja -kipsatuille potilaille.

MegaHemin avulla voidaan kompensoida kohohoidolla esim. paikallisen verenkiertohäiriön tai turvotuksen oireita.

Tukeva hemityyny soveltuu ylävartalon asentohoidon tukityynyksi. Hemityynyä voidaan käyttää niin alaraajojen kuin yläraajojenkin asentohoidossa, esim. kipsatun jalan tai käden tukemiseen kuin myös halvaantuneen raajan tukemiseen. Hemityyny soveltuu erinomaisesti myös tukityynyksi kylkiasentohoidossa.



Kylkiasentohoidossa selän takana.



Vakaa tuki lonkalle ja koko jalalle.



Kylkiasentohoidossa.



# MegaT: KÄYTTÖOHJEITA

MegaT on monipuolinen asentohoitotyyny, jonka T-muoto ja tukeva rakenne mahdollistavat monia erilaisia käyttömahdollisuuksia.

MegaT soveltuu erinomaisesti käsien ja jalkojen tukemiseen, mutta tyynyä voidaan käyttää myös kylkiasentohoidossa, jolloin sen T-muoto mahdollistaa esim. käden ja jalan samanaikaisen tukemisen tai vastavuoroisesti selän ja käden yhtäaikaisen tukemisen.



Kylkiasennossa jalkojen välissä.



Pystyasennossa kainalon alle asetettuna tyyny tukee istuvaa potilasta ehkäisten näin sivulle päin kallistumista.



Selinmakuulla jalkojen välissä.



Tyynyn T-jalka ylöspäin jalkojen väliin asennettuna se toimii myös peiton kohottajana ennaltaehkäisten näin peiton painosta johtuvaa nilkkojen yliojentumista.



# MegaT: KÄYTTÖOHJEITA

Säädettävissä oleva MegaT on monipuolinen asentohoitotyyny, jonka T-muoto ja tukeva rakenne mahdollistavat monia erilaisia käyttömahdollisuuksia.



Selinmakuuasennossa T-tyynyllä voidaan tukea selän eri alueita tarpeen mukaan.



Kylkiasennossa selän takana.



Molempien käsien yhtäaikaista tukeminen.



Polvitaipeden alla ja polvien välissä.



# MegaQ: KÄYTTÖOHJEITA

MegaQ on monipuolinen asentohoitotyyny. Se soveltuu asentohoidossa ja vartalon tukemisessa lähes kaikkiin tarkoituksiin niin makuu- kuin istuma-asennossakin.

Tyynyn kaareva muoto ja tukeva rakenne tuovat osaltaan lisäsovellusmahdollisuuksia, ergonomiia ja turvallisuuden tuntea käyttäjälle.

Pakaroiden alle asetettuna säädettävä MegaQ toimii erinomaisesti liikumisen estäjänä, kun potilas on vuoteessa puoli-istuvassa asennossa. Lisäksi se voidaan asettaa vastaavasti niskan, hartioiden ja jalkojen alle potilaan ollessa selinmakuulla.



Yläselän alle.



Pakaroiden alle.



Niskan alle.



Kantapäiden kohottamiseen.



# MegaQ: KÄYTTÖOHJEITA

Istuma-asennossa tyynyä voi käyttää vyötärön edessä, jolloin kädet voidaan asettaa myös tyynyn päälle. Levottoman potilaan horjauttaminen istuimelta voidaan ennaltaehkäistä pujottamalla riittävän pitkä ja joustava putkiharso tyynyn päälle ja sitomalla sen päät yhteen tuolin takana.



Vyötärön eteen.



Jalkojen väliin.



Vyötärön eteen.



Vyötärön taakse.

