

PedicRestabil JALKATUKITYYNY



VAKIOKOKO
20 x 55 x 7 cm

- Jalkojen tai käsien asentohoitoon ja tukemiseen
- Painehaavojen ennaltaehkäisyyn
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- kiinnitys tarrallisella läpällä raajan ympärille



MATERIAALIT

- Päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiominaisuudet
- Sisus PU-geelivaahtoa

TOIMIVUUS

- Tyyny soveltuu korjaamaan jalan virheasentoa, ei aiheuta ylijännusta polvitaipeseen
- Painetta tasaava PU-geelivaahto sekä hengittävä hygieniapäällinen auttavat ennaltaehkäisemään painehaavoja säären ja kantapään alueella
- Voidaan asettaa säären alle myös pitämään kantapää kokonaan irti alustasta

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuuttu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Geelivaahdolle ei suositella vespesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.



CE