

RTG-TASOPATJA KAHVOILLA



VAKIOKOKO
65 x 195 x 6 cm
(erikoiskoot mittatilaustyönä)

- Tasopatja RTG-pöydälle
- Tukevat kahvat auttavat potilaan kääntämisessä
- Liukas pohja helpottaa siirroissa
- Ympäristöystävällinen, soija-pohjainen vaahtomateriaali
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- vetoketju toisen lyhyen reunan päädyssä
- kolme kahvaa / puoli



MATERIAALIT

- RTG-patjan päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet.

TOIMIVUUS

- Hygieeninen tasopehmuste RTG-tasoille.
- Tukevat kahvat helpottavat potilaan kääntämistä sopivaan kuvausasentoon.
- Liukas pohjakangas auttaa siirroissa, mutta reunojen kitkapinta estää potilaan liukumisen reunalla istuessa.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 5 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

PEHMUSTEEN OMINAISUUDET

- Sisus on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta, soijaöljystä.
- PU-kimmovaahdon korkea tiheyspaino 43 kg/m³ takaa pitkän käyttöiän.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä.
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuattu.
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton.
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidilla.

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Patjan vaahdolle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.

