

MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA

Tyynyssä on neljä pituussuuntaista kennoa. Patentoimamme rakenteen ansiosta, käyttötarkoituksesta riippuen, tyynyn kennoja voidaan tukevoittaa tai keventää lisäämällä tai vähentämällä täytettä.

Sisätyynyn päädyssä on vetoketju mahdollista täytteiden käsittelyä varten. Vetoketjun avaamalla avautuu samalla kaikkien neljän eri kennon päät.



Ylävartalon tukemiseen.



Jalan kohohoitoon.



Psoas-tyynynä.



Kylkiasentohoidossa ylävartalon ja käden tukena.



MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA

Säädettävä MegaHemi soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin asentohoidossa. Nimensä mukaisesti se on tarkoitettu hemipotilaille, mutta myös vanhuksille, lonkkaleikatuille ja -kipsatuille potilaille.

MegaHemin avulla voidaan kompensoida kohohoidolla esim. paikallisen verenkiertohäiriön tai turvotuksen oireita.

Tukeva hemityyny soveltuu ylävartalon asentohoidon tukityynyksi. Hemityynyä voidaan käyttää niin alaraajojen kuin yläraajojenkin asentohoidossa, esim. kipsatun jalan tai käden tukemiseen kuin myös halvaantuneen raajan tukemiseen. Hemityyny soveltuu erinomaisesti myös tukityynyksi kylkiasentohoidossa.



Kylkiasentohoidossa selän takana.



Vakaa tuki lonkalle ja koko jalalle.



Kylkiasentohoidossa.

