

MegaT: KÄYTTÖOHJEITA

MegaT on monipuolinen asentohoitotyyny, jonka T-muoto ja tukeva rakenne mahdollistavat monia erilaisia käyttömahdollisuuksia.

MegaT soveltuu erinomaisesti käsien ja jalkojen tukemiseen, mutta tyynyä voidaan käyttää myös kylkiasentohoidossa, jolloin sen T-muoto mahdollistaa esim. käden ja jalan samanaikaisen tukemisen tai vastavuoroisesti selän ja käden yhtäaikaisen tukemisen.



Kylkiasennossa jalkojen välissä.



Pystyasennossa kainalon alle asetettuna tyyny tukee istuvaa potilasta ehkäisten näin sivulle päin kallistumista.



Selinmakuulla jalkojen välissä.



Tyynyn T-jalka ylöspäin jalkojen väliin asennettuna se toimii myös peiton kohottajana ennaltaehkäisten näin peiton painosta johtuvaa nilkkojen yliojentumista.



MegaT: KÄYTTÖOHJEITA

Säädettävissä oleva MegaT on monipuolinen asentohoitotyyny, jonka T-muoto ja tukeva rakenne mahdollistavat monia erilaisia käyttömahdollisuuksia.



Selinmakuuasennossa T-tyynyllä voidaan tukea selän eri alueita tarpeen mukaan.



Kylkiasennossa selän takana.



Molempien käsien yhtäaikaista tukeminen.



Polvitaiteiden alla ja polvien välissä.

