



Säädettävien ega^T tukityynyjen puhdistus- ja hoito-ohje

Pinnan pyyhintä

Pölyisen pinta pyyhitään heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Pesuliuksista saattaa jäädä jäämiä päälliseen, joten päällinen tulee huuhdella aika ajoin puhtaaseen, lämpimään veteen kastellulla, nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai päällinen tulee pestä koneellisesti (ks. koneellinen pesu). Pintapyyhinnän jälkeen päällisen vetoketjun voi aukaista, jolloin sisus pääsee tuulettumaan hetkeksi.

Eritetahradesinfiointi

Poista irtoava lika kuivalla liinalla. Käytä happeen perustuvia desinfiointiaineita (PH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT -liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (pH≈10). **Huom! Vältä kaikkia syövyttäviä puhdistusaineita.** Jos niitä joudutaan kuitenkin käyttämään, tulee ne huuhdella puhtaaseen, lämpimään veteen kastetulla, nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai päällinen tulee pestä koneellisesti.

Eristysdesinfiointi

Suosittelemme päällisen ja sisäpäällisen konepesua (ks. koneellinen pesu).

Koneellinen pesu, kuivaus



Pesu hienopesuohjelmalla

70 °C:ssa 10 min, max. 95 °C:ssa Ennen kuumadesinfiointia esipesu 40 °C:ssa. Ei huuhteluaineita. Avaa hygieniapäällisen vetoketju ja käännä sisäpuolet ulos pesun ajaksi. Käytä pesupussia. Ei linkousta. Suosittelemme ripustuskuivausta esim. kuivaushuoneessa. Huom! Varmista että päällinen on täysin kuiva ennen kuin asetat sen takaisin sisäpäällisen päälle!



MediMattress

Parempaan hoitoon

MediMattress Oy, Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki

puh. 0306 40 40 40 asiakaspalvelu@medimattress.fi www.medimattress.fi

MediMattress Oy on ISO 13485 ja ISO 14001 -sertifioitu yritys