



Kennoston ja säätölaitteen puhdistus

Suosittellemme kennoston, muoviosien, letkujen ja säätölaitteen desinfektio-
pyyhintää tavanomaisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla (mm. etanoli-
liuokset 60-80 %, klooriliuokset max. 1000 ppm).

Kuivatus huoneenlämmössä. **Ei sterilointia autoklaavissa.**
Kennosto voidaan desinfioida pesemällä 70 °C lämpötilassa.

Päällisen pyyhintä

Pinta pyyhitään heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desin-
fektioaineilla. Pesuliuksista saattaa jäädä jäämiä päälliseen, joten se tulee
huuhdella aika ajoin puhtaaseen, lämpimään veteen kastellulla, nihkeäksi
puristetulla puhdistusliinalla tai päällinen tulee pestä koneellisesti (ks.
koneellinen pesu). Pintapyyhinnän jälkeen päällisen vetoketjun voi
aukaista, jolloin sisus pääsee tuulettumaan hetkeksi.

Eritetahradesinfiointi

Poista irtoava lika kuivalla liinalla. Käytä hapteen perustuvia desinfiointi-
aineita (pH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti
emäksisen KloraminT -liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnai-
sesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa
olla 60-80 % (pH≈10).

Huom! Vältä kaikkia syövyttäviä puhdistusaineita. Jos niitä joudu-
taan kuitenkin käyttämään, tulee ne tule huuhdella puhtaaseen, lämpi-
mään veteen kastetulla, nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai päälli-
nen tulee pestä koneellisesti.

Eristysdesinfiointi

Suosittellemme päällisen konepesua. Ennen pesua pyyhi ja huuhtelee pääl-
linen yllä mainitun eritetahradesinfiointiohjeen mukaisesti, jotta mikrobeja
ei pääse kulkeutumaan sisukseen päällisen poiston yhteydessä.

Koneellinen pesu, kuivaus

Pesu hienopesuohjelmalla 70 °C:ssa 10 min, max. 95 °C:ssa. Ennen kuu-
madesinfiointia esipesu 40 °C:ssa. Ei huuhteluaineita. Avaa vetoketju ja
käännä päällisen sisäpuolet ulos pesun ajaksi. Käytä pesupussia. Ei lin-
kousta. Suosittelemme ripustuskuivausta esim. kuivaushuoneessa. Huom!
Varmista että päällinen on täysin kuiva ennen kuin asetat sen takaisin
patjan päälle! **Rehab-vaahotosiuksia ei saa pestä!**

HUOM! Jos kennosto/päällinen altistuu pitkäaikaisesti urealle, polyure-
taanin molekyyli rakenne voi rikkoutua ja patjaan tulla reikä. **Huolehdi
siis, että mahdollinen patjan päälle joutunut virtsa pyyhitään pois
mahdollisimman pian.**