

Pikakäyttöohje

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

ELVYTYSTILANTEESSA:

Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.



Valmiustila-näppäintä painamalla laite käynnistyy ja aloittaa säätämisen **Normaali**-toimintoon. Anna laitteen säätyä **Normaali**-toimintoon ilman potilasta. Painamalla näppäintä uudestaan laite sammuu huolimatta käynnissä olevasta toiminnosta.



Näppäimistön lukitus ja avaus. Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia yhtäjaksoisesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Painamalla yhtäjaksoisesti uudelleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu.



Informaatiosignaalin **kuittaustoiminnolla** sammutetaan laitteen informaatiosignaalit. **Äänisignaali** kuittaautuu yhdellä painalluksella ja **visuaaliset signaalit kolmen (3) sekunnin yhtäjaksoisella painalluksella**. Tutustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttöohjeessa. Pikakäyttöohjeen toisella puolella on esimerkki vianetsinnästä.



Normaali-toimintoa käytetään **kaikissa makuuasennoissa**. Perustoiminto, johon säätölaite automaattisesti siirtyy käynnistettäessä.



Äänetön-toiminto voidaan valita tilanteessa, jossa halutaan minimoida laitteen säätösyklien ja pumpun toimintaa esimerkiksi yöaikaan potilaan nukkuaessa. Kahdeksan (8) tunnin kuluttua **Äänetön**-toiminnon valinnasta laite palaa automaattisesti **Normaali**-toimintoon.



Supine- eli **selinmakuutoimintoa** käytetään **ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan hoitoon vaakatasossa selinmakuulla**. Patjajärjestelmä säätyy tällöin alimpaan mahdolliseen paineasetukseen. **HUOM: Varmista, että potilas on vaakatasossa selinmakuulla, kun valitset toiminnon.**



Istumistoiminto on tarkoitettu potilaalle, joka on istuvassa asennossa vuoteen selkäosan ollessa kohotettuna yli 30 asteen kulmaan. Tunnin kuluttua toiminnon valinnasta informaatiosignaali huomauttaa hoitohenkilökuntaa/käyttäjää kasvavasta painehaavavariskistä.



Kovetustoiminto kovettaa kennoston hoitotoimenpiteiden ajaksi. Säätölaite palaa 30 min. kuluttua automaattisesti **Normaali**-toimintoon, mikäli muuta toimintoa ei ole valittu. **HUOM: Kun kennosto kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikenevät.**



Ledit vasemmalta lukien: virtakaapeli kytketty, akkukäyttö, Bluetooth-yhteys.



Pikakäyttöohje

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

Esimerkki vianetsinnästä - Vuoto letkustossa tai sisäkennostossa

Tarkista ilmaletkut;
katso irrotettava
pikaohje

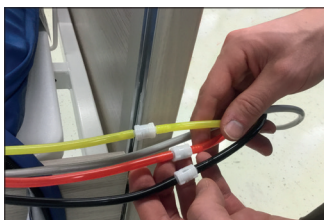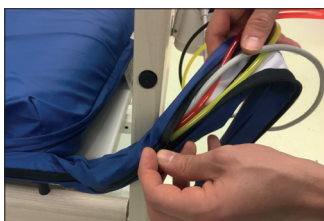

1. Säätlölaite antaa äänisignaalin ja näyttöön tulee oheinen teksti. LED-valot palavat jonkin säätöalueen (osoitettu letkuja vastavilla väreillä) osalta oranssin sävyisinä.
2. Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtube-liitin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiinnikkeissä.



Optima7080/Optima8590/OptimaBario



OptimaCot/OptimaJuve

3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätölaitteen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastavuus (esimerkiksi musta mustaan).

4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asianmukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätietoja. Sulje tämän jälkeen letkusukka.



3 s.

5. Kuittaa informaatio-signaali painamalla informaatio-signaalin kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan. Seuraa, että patjajärjestelmä säätö valittuun toimintoon onnistuneesti.

Mikäli informaatio-signaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital®-huoltoon.

Arkisin klo 8-16, puh. 0306 40 40 45