

Snabbguide

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

OBS! Sätt tillbaka snabbguidehållaren på sin plats efter läsning.

ÅTERUPPLIVNINGSSITUATIONER:

Stäng av enheten med knappen för beredskapsläge och påbörja återupplivning omedelbart utan att tömma cellsystemet.



Starta enheten genom att trycka på knappen för **beredskapsläge**; inställning för **Normal-funktion** påbörjas. Låt enheten ställa in sig för **Normal-funktion** utan patient. Enheten stängs av genom att trycka på knappen på nytt oavsett pågående funktion.



Öppna och låsa knapplåset. Vid behov kan knapplåset låsas genom oavbruten tryckning på knappen i tre (3) sekunder. Knapplåset öppnas genom ny oavbruten tryckning i tre (3) sekunder.



Enhetens informationssignaler stängs av med **informationssignalens kvitteringsfunktion**. **Ljudsignalen kvitteras med en kortvarig tryckning och de visuella signalerna kvitteras genom en oavbruten tryckning i tre (3) sekunder.** Studera bruksanvisningen så att du blir förtrogen med olika felsituationer. Ett exempel på felsökning finns på andra sidan av snabbguiden.



Normaali

Normal-funktion används i alla liggställningar. Madrasssystemets grundfunktion, till vilken styrapparaten växlar vid start.



Ljudlös-funktion kan väljas i situationer när man vill minimera enhetens regleryckel och pumpens funktion, till exempel på natten när patienten sover. Enheten återgår automatiskt till **Normal-funktionen** åtta (8) timmar efter valet **Ljudlös-funktionen**.



Supine

Supine- eller ryggglägesfunktionen används **endast för vård av en rörelseoförmögen patient liggande på rygg i horisontalläge.** Madrasssystemet ställer in sig på lägsta möjliga tryckinställning. **OBS: Se till att patienten ligger vågrätt på rygg när funktionen väljs.**



Sittfunktionen är avsedd för en patient i sittande ställning, med sängens ryggdel upphöjd mer än 30 grader. En timme efter valet av funktionen påminner informationssignalen vårdpersonalen/användaren om ökad risk för trycksår.



Fast-funktionen gör **cellsystemet** **fastare** för vårdåtgärder. Efter 30 minuter återgår styrapparaten automatiskt till **Normal-funktionen** om ingen annan funktion har valts. **OBS: Madrassens tryckreduceringsegenskaper försvagas när cellsystemet blir fastare.**



Lysdioderna från vänster: **nätkabeln ansluten, ackumulatordrift, Bluetooth-förbindelse.**



Snabbguide

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

OBS! Sätt tillbaka snabbguidehållaren på sin plats efter läsning.

Felsökningsexempel - läckage i slangar eller innerceller

Tarkista ilmaletkut;
katso irrotettava
pikaohje

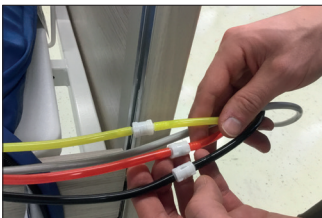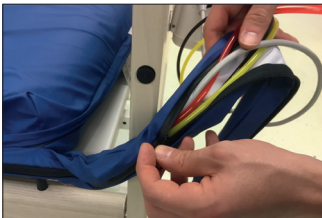

1. Styrapparaten avger en ljudsignal och på skärmen visas vidstående text. Lysdioderna lyser med orange sken i något reglerområde (indikeras med färger som motsvarar slangarna).

2. Kontrollera först att Sixtube-anslutningen till styrapparaten är fastsatt på sin plats och att de i anslutningen anslutna slangarna är fixerade i sina fästen.



Optima7080/Optima8590/OptimaBario



OptimaCot/OptimaJuve

3. Öppna slangstrumpan och kontrollera att slangarna mellan cellsystemet och styrapparaten sitter fast i anslutningarna. Kontrollera även färgmatchningen (t.ex. svart till svart).

4. Fäst eventuellt lösa slangar korrekt vid varandra. Se bruksanvisningen för mer information vid behov. Stäng sedan slangstrumpan.

5. Kvittera informationssignalen genom oavbruten tryckning på informationssignalens kvitteringsknapp i tre (3) sekunder. Kontrollera att madrasssystemet ställer in sig för den valda funktionen.

Om informationssignalen återkommer, kontakta Carital® -service.

Vardagar kl. 8.30-15.30, tel. 0306 40 40 45



PKOHJ-H1-01-SE1-1.2-19032021