








# Snabbguide

OptimaEZ420 / OptimaEZ

OBS! Sätt tillbaka snabbguidehållaren på sin plats efter läsning.

## ÅTERUPPLIVNINGSSITUATIONER:

Stäng av enheten med knappen för beredskapsläge och påbörja återupplivning omedelbart utan att tömma cellsystemet.


	Starta enheten genom att trycka på knappen för <b>beredskapsläge</b> ; inställning för <b>Normal</b> -funktion påbörjas. Låt enheten ställa in sig för <b>Normal</b> -funktion utan patient. Enheten stängs av genom att trycka på knappen på nytt oavsett pågående funktion.
	Öppna och låsa knapplåset. Vid behov kan knapplåset låsas genom oavbruten tryckning på knappen i tre (3) sekunder. Knapplåset öppnas genom ny oavbruten tryckning i tre (3) sekunder.
	Enhetens informationssignaler stängs av med <b>informationssignalens kvitteringsfunktion</b> . <b>Ljudsignalen kvitteras med en kortvarig tryckning och de visuella signalerna kvitteras genom en oavbruten tryckning i tre (3) sekunder</b> . Studera bruksanvisningen så att du blir förtrogen med olika felsituationer. Ett exempel på felsökning finns på andra sidan av snabbguiden.
 Normali	<b>Normal</b> -funktion används <b>i alla liggställningar</b> . Madrassens grundfunktion, till vilken styrapparaten växlar vid start.
	<b>Sittfunktionen</b> är avsedd för en patient i sittande ställning, med sängens ryggdel upphöjd mer än 30 grader. En timme efter valet av funktionen påminner informationssignalen vårdpersonalen/användaren om ökad risk för trycksår.
	<b>Fast</b> -funktionen gör madrassen <b>fastare</b> för vårdåtgärder. Efter 30 minuter återgår styrapparaten automatiskt till <b>Normal</b> -funktionen om ingen annan funktion har valts. <b>OBS: Madrassens tryckreduceringsegenskaper försvagas när madrassen blir fastare.</b>
	Lysdioderna från vänster: nätkabeln ansluten, ackumulatordrift, <b>Bluetooth-förbindelse</b> .

# Snabbguide

OptimaEZ420 / OptimaEZ

**OBS! Sätt tillbaka snabbguidehållaren på sin plats efter läsning.**

Fölsökningsexempel - läckage i slangarna eller cellsystemet

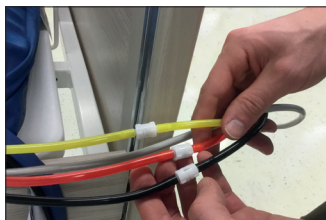

1. Styrapparaten avger en ljudsignal. Lysdioderna lyser med orange sken i något reglerområde (indikeras med färger som motsvarar slangarna).
2. Kontrollera först att Sixtube-anslutningen till styrapparaten är fastsatt på sin plats och att de i anslutningen anslutna slangarna är fixerade i sina fästen.
3. Öppna slangstrumpan och kontrollera att slangarna mellan cellsystemet och styrapparaten sitter fast i anslutningarna. Kontrollera även färgmatchningen (t.ex. svart till svart).
4. Fäst eventuellt lösa slangar korrekt vid varandra. Se bruksanvisningen för mer information vid behov. Stäng sedan slangstrumpan.
5. Kvittera informationssignalen genom oavbruten tryckning på informationssignalens kvitteringsknapp i tre (3) sekunder. Kontrollera att madrassen ställer in sig för den valda funktionen.

Om informationssignalen återkommer, kontakta Carital®-service.

Vardagar kl. 8.30-15.30. tel. 0306 40 40 45

carital®

PKOHJ-H1-02-SE1-1.0-09062020