



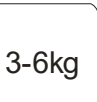



Carital Neo & säätölaite

painoraja **0-6 kg**

PIKAKÄYTTÖOHJE

Carital®-säätölaite on varustettu suojamaadoitetulla pistotulpalla (suojausluokka I). **Pistotulpan saa kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.**

	Kytke ilmaletkut Carital® Neo -patjaan ja -säätölaitteeseen. Seuraa värikoodeja. Liitä laite verkkoon. Kytke virta päälle. Laite testaa toimintavalmiuden ja odottaa 15 min. painoluokan valintaa. Mikäli painoluokkaa ei valita, säätölaite hälyttää.
	Valitse painoluokkatoiminto, kun potilaan paino on 0-3 kg .
	Valitse painoluokkatoiminto, kun potilaan paino on 3-6 kg .
	Laite ilmoittaa vian valo- ja äänimerkein. Hälytys voidaan sulkea hälytyksen kuittaus -toimintopainikkeella. Ensimmäinen painallus sammuttaa summerin ja toinen resetoi laitteen. Mikäli uutta toimintoa ei valita 15 min. kuluessa, laite hälyttää jälleen.

Tekniset tiedot:

Koko 8 x 10 x 32 cm
Paino 2,4 kg
Nimell. ottotehto max. 34 W
Suojaluokka 1B

IP luokka Ip20, ei suojattu veden tunkeutumista vastaan
Sähköturvallisuus EMC IEC 60601-1(3.1) cl. 8
IEC 60601-1-2:2007 (Ed. 3.0),
IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4.0)



9/2020







Carital Neo & manöverpanel

patientvikt **0-6 kg**

SNABBGUIDE

Carital® kontrollern är försedd med en jordad stickkontakt (skyddsklass I). **Stickkontakten får endast kopplas till ett jordat vägguttag.**

	Koppla luftslangarna från Carital® Neo madrassen till manöverpanelen enligt färgerna. Anslut nätkabeln dels till nätintaget på manöverpanelens vänstra kortsida, dels till vägguttaget. Tryck på strömavbrytaren. Manöverpanelen testar nu funktionerna och väntar 15 minuter på funktionsval. Om ingen viktklass väljs, larmar manöverpanelen.
	Välj viktklassfunktionen då patienten väger 0-3 kg .
	Välj viktklassfunktionen då patienten väger 3-6 kg .
	Kvitteringsfunktion av alarmeret. Trycker man en gång stängs ljudet av och andra trycket återställer enheten. Om man inte väljer en ny funktion inom 15 minuter, larmar manöverpanelen igen.

Tekniska data:

Storlek 8 x 10 x 32 cm
Vikt 2,4 kg
Nominell ineffekt max. 35 W
Skyddsklass 1B

IP klass IP20, tål ej vatten. Får ej användas i närheten av lättantändliga vätskor
Säkerhet EMC IEC 60601-1(3.1) cl. 8
IEC 60601-1-2:2007 (Ed. 3.0),
IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4.0)



6/2017