

Exact™ High KOROTUSTYYNY



Exact™ High on hygieniapäällisellä varustettu istuin- tai korotustyynty.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



YLEISKUVAUS

Exact™ High on hygieniapäällisellä varustettu istuin- tai korotustyynty.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on istuinasennon korotus tasaisilla istuma-alustoilla potilailla, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt käytön tarpeelliseksi sekä arvioinut tuotteen sopivan kyseiseen hoitotilanteeseen.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on perehtynyt istumisen fysiologiaan, tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkitäytteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Istuintyynty on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön istuma-asennossa, istumisvaiheiden kesto tulee määrittää erikseen terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Heikentynyt tunne ja/tai kyvyttömyys suorittaa paineita vähentäviä liikkeitä voi rajoittaa suuresti jokaista istumisjaksoa.

VASTA-AIHEET

Istuintyyntyä ei tule käyttää potilailla, joilla on keskinkertainen, korkea tai erittäin korkea painehaavan riski kliinisen arvioinnin perusteella. Kaikki potilaat, joille on kehittynyt painehaava istuintyyntyn kanssa kosketuksessa olevalle alueelle, kuuluvat joko korkean tai erittäin korkean riskin luokkiin riippumatta edellisen tai olemassa olevan painehaavan vakavuusluokituksesta.

Istuintyynty eivät sovellu käytettäväksi leikkauksen jälkeisessä hoidossa kosketuksissa operoituun alueeseen.

TUOTETURVALLISUUS


Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkitäytteen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.¹



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Exact™ High KOROTUSTYYNY

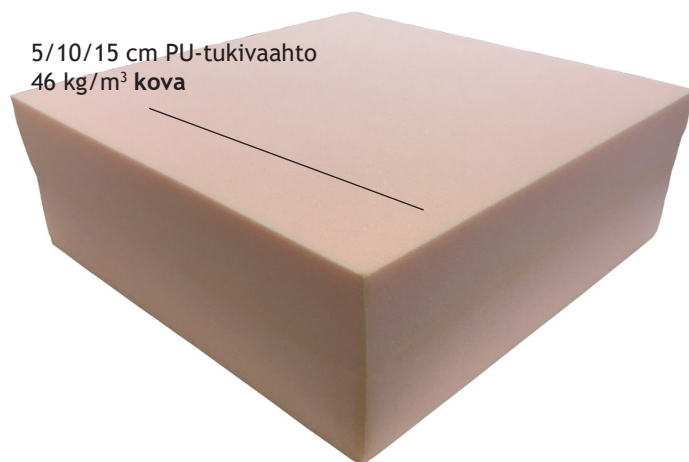

5/10/15 cm PU-tukivahto
46 kg/m³ kova

VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Vahtosisus on PU-tukivahtoa.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET


Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritetiivistä³ PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁴. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁵. Päällisessä on vetoketju kahdella sivulla sekä kantokahva vakiona.

PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

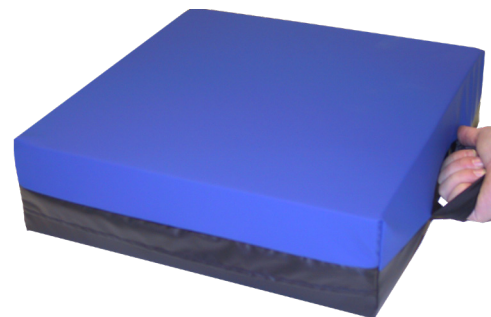

Exact™ High-korotustyynyssä on vakiona kantokahva.

VAKIOKOOT JA PAINOT

40 x 40 x 5/10/15 cm, 530/755/1250 g

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttö-tarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai sekajät-teisiin.

TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.



HOITO-OHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioidulla pesuliuoksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.

Huom! Vahtosisukselle ei vesipesua!



LÄHTEET

¹Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastaa- van mukaisesti.

²Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

³Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

⁴Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁵Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi