

## Exact™ Hip KOROTUSTYYNY



Exact™ Hip on hygieniapäällisellä varustettu istuin- tai korotustyynty.

*Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.*



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### YLEISKUVAUS

Exact™ Hip on hygieniapäällisellä varustettu istuin- tai korotustyynty.

### KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on istuinasennon korotus tasaisilla istuma-alustoilla potilailla, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt käytön tarpeelliseksi sekä arvioinut tuotteen sopivan kyseiseen hoitotilanteeseen.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

### KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on perehtynyt istumisen fysiologiaan, tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkitä lääkinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

### INDIKAATIOT

Istuintyynty on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön istuma-asennossa, istumisvaiheiden kesto tulee määrittää erikseen terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Heikentynyt tunne ja/tai kyvyttömyys suorittaa paineita vähentäviä liikkeitä voi rajoittaa suuresti jokaista istumisjaksoa.

### VASTA-AIHEET

Istuintyyntyä ei tule käyttää potilailla, joilla on keskinkertainen, korkea tai erittäin korkea painehaavan riski kliinisen arvioinnin perusteella.

Kaikki potilaat, joille on kehittynyt painehaava istuintyyntyn kanssa kosketuksessa olevalle alueelle, kuuluvat joko korkean tai erittäin korkean riskin luokkiin riippumatta edellisen tai olemassa olevan painehaavan vakavuusluokituksesta.

Istuintyynty eivät sovellu käytettäväksi leikkauksen jälkeisessä hoidossa kosketuksissa operoituun alueeseen.

### TUOTETURVALLISUUS


Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkitä lääkitä laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Vahtomateriaalit ovat CertiPUR-sertifioituja. Tuotteen paloluokitus on SL 1.<sup>1</sup>



### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi

## Exact™ Hip KOROTUSTYYNY

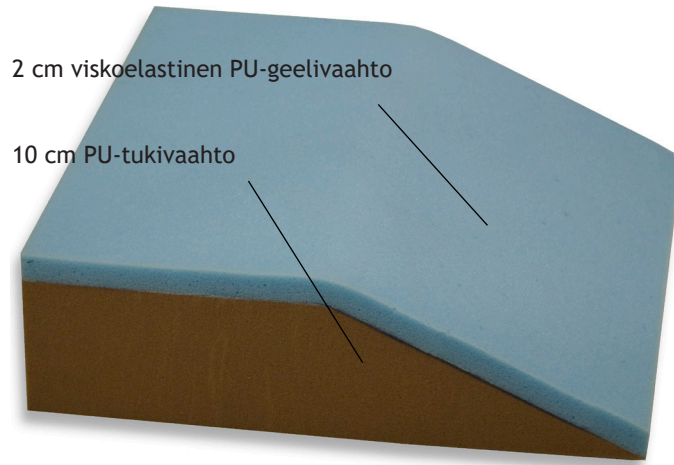

2 cm viskoelastinen PU-geelivahto

10 cm PU-tukivahto

### VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Vahtosisus koostuu kahdesta yhteenliimatus PU-vahtomuovikerroksesta: 2 cm viskoelastinen PU-geelivahto ja 10 cm PU-tukivahto.

### HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-<sup>2</sup>, lika- ja eritetiivistä<sup>3</sup> PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys<sup>4</sup>. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus<sup>5</sup>. Päällisessä on vetoketju kahdella sivulla sekä kantokahva vakiona.

### PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



Exact™ Hip-korotustyynyssä on vakiona kantokahva.

### VAKIOKOKO JA PAINO

42 x 42 x 12 cm, 1200 g

### TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttö-tarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energijakeena tai sekajät-teisiin.

### TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Ta-kuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaali-virheistä tai valmistuksesta.

### HOITO-OHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioidulla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.

**Huom!** Vahtosisukselle ei vesipesua!



### LÄHTEET

<sup>1</sup>Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastavaan mukaisesti.

<sup>2</sup>Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

<sup>3</sup>Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

<sup>4</sup>Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

<sup>5</sup>Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.



### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki

p. 0306 40 40 40

asiakaspalvelu@medimattress.fi

tilaus@medimattress.fi

www.medimattress.fi