

Exact™ istuintyynyjen KÄYTTÖOHJE

Exact-istuintyyny toimitetaan päällinen valmiiksi puettuna tuotteen päälle. Aseta tyyny istuimen päälle siten, että hygieniapäällisen tippasuojaa osoittaa alas:



Tyynyn sisuksen kääntäminen vaakasuorassa ympäri aika ajoin pidentää tuotteen käyttöikää. **Huom! Vain Exact5, Exact7 ja ExactHigh -tyynyjen sisusta voi kääntää myös ylösalaisin.**

Exact2 ja ExactXL -istuintyynyissä on kahta eri vaahdotyyppiä. Pehmeä, **valkoinen viskoelastinen vaahdotyyppi tulee olla ylöspäin**. Varmistu tästä avaamalla päällinen ja tarkistamalla vaahdon väri:



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy Haukilahdenkatu 4 00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40 asiakaspalvelu@medimattress.fi www.medimattress.fi
MediMattress Oy on ISO 13485 ja ISO 14001 -sertifioitu yritys

Exact™ istuintyynyjen PUHDISTUS- JA HOITO-OHJE

Hygieniapäällisen pinnan pyyhintä

Päällisen pinta pyyhkitään heikosti emäksisellä pesuliuoksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Pesuliuoksista saattaa jäädä jäämiä päälliseen, joten päällinen tulee huuhdella aika ajoin puhtaaseen, lämpimään veteen kastellulla, nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai päällinen tulee pestä koneellisesti (ks. koneellinen pesu). Pinta-pyyhinnän jälkeen päällisen vetoketjun voi aukaista, jolloin sisus pääsee tuulettumaan hetkeksi.

Eritetahradesinfiointi

Poista irtoava lika kuivalla liinalla. Käytä happeen perustuvia desinfiointiaineita (pH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT -liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (pH≈10). **Huom! Vältä kaikkia syövyttäviä puhdistusaineita.** Jos niitä joudutaan kuitenkin käyttämään, tulee ne huuhdella puhtaaseen, lämpimään veteen kastetulla, nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai päällinen tulee pestä koneellisesti.

Eristysdesinfiointi

Suosittelemme päällisen konepesua. Ennen pesua pyyhi ja huuhtele päällinen yllä mainitun eritetahradesinfiointiohjeen mukaisesti, jotta mikrobeja ei pääse kulkeutumaan sisukseen päällisen poiston yhteydessä.

Koneellinen pesu, kuivaus

Pesu hienopesuohjelmalla 70 °C:ssa 10 min, max. 95 °C:ssa. Ennen kuumadesinfiointia esipesu 40 °C:ssa. Ei huuhteluaineita. Avaa vetoketju ja käännä päällisen sisäpuolet ulos pesun ajaksi. Käytä pesupussia. Ei linkousta. Suosittelemme ripustuskuivausta esim. kuivaushuoneessa. **Huom! Varmista että päällinen on täysin kuiva ennen kuin asetat sen takaisin pehmusteen päälle!**



Huom! Vaahtoisukselle ei vesipesua!