

MediEva-pelastuslakanan KÄYTTÖOHJE

MediEva-pelastuslakana mahdollistaa potilaan turvallisen evakuoinnin niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa.

ASENNUS



1. **MediEva** pelastuslakana asetetaan patjan alle ja kiinnitetään paikalleen päätyhuppujen avulla.



2. Jos patjan leveys on 85-90 cm, käännä leviketaitokset esiin



3. Potilaan kiinnittämiseen tarkoitetut hihnat ovat suojassa pelastuslakanan sivuilla, taiteltuina vetoketjullisen taskun sisään.



4. Kiinnityshihnoista jää näkyviin patjan ulkopuolelle punaiset päät merkinä pedatusta pelastuslakanasta. Aluslakana pedataan täysin normaalisti

Pelastuslakana on suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa.

MediEva-pelastuslakanan KÄYTTÖOHJE

EVAKUOINTI



1. Vedä potilaan kiinnityshihnat (2 paria) esiin patjan molemmilta sivuilta.



2. Kiinnitä hihnat potilaan ympäri sekä rinnan että jalkojen kohdilta.



3. Tartu pikalukkoihin...



4. ... ja napsauta pikalukko kiinni.



5. Toista sama jalkopään hihnalle. Kiristä hihna niin tiukalle, että patjan sivureunat kohoavat merkittävästi.



6. Potilas on valmis evakuointiin.



7. Tartu päädyn vetohihnaan, käännä patja poikittain ja laske pelastettava lattialle pääpuolesta kannatellen.



8. Pelastettava voidaan nyt siirtää turvallisesti vetäen patjan päätyjen tukevista ja kestävästä pelastus/vetohihnoista.

10/2017