

# Pikakäyttöohje

OptimaEZ420 / OptimaEZ

**HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.**

## ELVYTYSTILANTEESSA:

**Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.**



**Valmiustila**-näppäintä painamalla laite käynnistyy ja aloittaa säätämisen **Normaali**-toimintoon. Anna laitteen säätyä **Normaali**-toimintoon ilman potilasta. Painamalla näppäintä uudestaan laite sammuu huolimatta käynnissä olevasta toiminnosta.



**Näppäimistön lukitus ja avaus.** Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia yhtäjaksoisesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Painamalla yhtäjaksoisesti uudelleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu.



**Informaatio-signaalin kuittaustoiminnolla** sammutetaan laitteen informaatio-signaalit. **Äänisignaali** kuittaautuu yhdellä painalluksella ja **visuaaliset signaalit kolmen (3) sekunnin yhtämittaisella painalluksella.** Tutustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttöohjeessa. Pikaohjeen toisella puolella on esimerkki vianetsinnästä.



Normaali

**Normaali**-toimintoa käytetään **kaikissa makuuasennoissa.** Perustoiminto, johon säätölaite automaattisesti siirtyy käynnistettäessä.



**Istumustoiminto** on tarkoitettu potilaalle, joka on istuvassa asennossa vuoteen selkäosan ollessa kohotettuna yli 30 asteen kulmaan. Tunnin kuluttua toiminnon valinnasta informaatio-signaali huomauttaa hoitohenkilökuntaa/käyttäjää kasvavasta painehaavavariskistä.



**Kovetustoiminto** kovettaa kennoston hoitotoimenpiteiden ajaksi. Säätölaite palaa 30 minuutin kuluttua automaattisesti **Normaali**-toimintoon, mikäli muuta toimintoa ei ole valittu. **HUOM: Kun kennosto kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikkenevät.**





Ledit vasemmalta lukien: virtakaapeli kytketty, akkukäyttö, Bluetooth-yhteys.

# Pikakäyttöohje

OptimaEZ420 / OptimaEZ

**HUOM!** Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

Esimerkki vianselvityksestä - Vuoto letkustossa tai sisäkennostossa

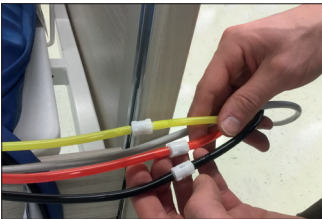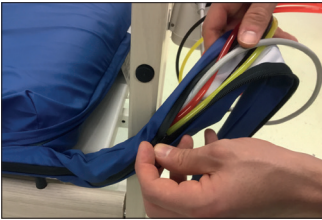

3 s.

1. Säätläite antaa äänisignaalin. LED-valot palavat jonkin säätöalueen (osoitettu letkuja vastaavilla väreillä) osalta oranssin sävyisinä.
2. Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtubeliitin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiinnikkeissään.
3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätölaitteen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastavuus (esimerkiksi musta mustaan).
4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asianmukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätietoja. Sulje tämän jälkeen letkusukka.
5. Kuittaa informaatio-signaali painamalla informaatio-signaalin kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan. Seuraa, että patjajärjestelmä säättyä valittuun toimintoon onnistuneesti.

Mikäli informaatio-signaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital®-huoltoon.

Arkisin klo 8.30-15.30, puh. 0306 40 40 45

carital®

PKOHJ-H1-02-FI-1.5-19032021