

## Pro™Haaravyön KÄYTTÖOHJE

7/2016

ProHaaravyö on suunniteltu korjaamaan käyttäjän istuma-asentoa estäen valumisen alaspäin.

	
<p>1. Aseta ProHaaravyö kuvan mukaisesti istuimelle. Haaravyön leveämpi pää tulee eteen.</p>	<p>2. Istuta käyttäjä haaravyön päälle. Nosta etuosa vatsaa vasten.</p>
	
<p>3. Vedä haaravyön kiinnityshihnat istuimen taakse...</p>	<p>4. ..., napsauta ylähihnan pikalukko kiinni ja kiristä hihna sopivaksi. Hihnan yli jäävän osan voi kiertää hihnan/pikalukon ympäri.</p>

# Pro™ Haaravyön KÄYTTÖOHJE

7/2016

	
<p>5. Tuo haaravyön alahihnat istuimen taakse ja kierä pitempi hihna esim. tuolin jalan tms. ympäri.</p>	<p>6. Säädä urospuolinen hihna sopivan pituiseksi.</p>
	
<p>7. Napsauta pikalukko kiinni ja kiristä hihna sopivan tiukalle. Kierrä hihnan yli jäävä osa hihnan/pikalukon ympäri.</p>	<p>8. Valmis haaravyö tuoliin kiinnitettynä. Kuvassa geriatrinen tuoli.</p>