

# Pikakäyttöohje

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

**HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.**

## ELVYTYSTILANTEESSA:

**Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.**



**Valmiustila**-näppäintä painamalla laite käynnistyy ja aloittaa säätämisen **Normaali**-toimintoon. Anna laitteen säätyä **Normaali**-toimintoon ilman potilasta. Painamalla näppäintä uudestaan laite sammuu huolimatta käynnissä olevasta toiminnosta.



**Näppäimistön lukitus ja avaus.** Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia yhtäjaksoisesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Painamalla yhtäjaksoisesti uudelleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu.



**Informaatio**signaalin **kuittaustoiminnolla** sammutetaan laitteen informaatio signaalit. **Äänisignaali** kuittaautuu yhdellä painalluksella ja **visuaaliset signaalit kolmen (3) sekunnin yhtäjaksoisella painalluksella.** Tutustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttöohjeessa. Pikakäyttöohjeen toisella puolella on esimerkki vianetsinnästä.



Normaali

**Normaali**-toimintoa käytetään **kaikissa makuuasennoissa.** Perustoiminto, johon säätölaite automaattisesti siirtyy käynnistettäessä.



**Äänetön**-toiminto voidaan valita tilanteessa, jossa halutaan minimoida laitteen säätösyklien ja pumpun toimintaa esimerkiksi yöaikaan potilaan nukkessa. Kahdeksan (8) tunnin kuluttua **Äänetön**-toiminnon valinnasta laite palaa automaattisesti **Normaali**-toimintoon.



Supine

**Supine**- eli **selinmakuutoimintoa** käytetään **ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan hoitoon vaakatasossa selinmakuulla.** Patjajärjestelmä säätyy tällöin alimpaan mahdolliseen paineasetukseen. **HUOM: Varmista, että potilas on vaakatasossa selinmakuulla, kun valitset toiminnon.**



**Istumistoiminto** on tarkoitettu potilaalle, joka on istuvassa asennossa vuoteen selkäosan ollessa kohotettuna yli 30 asteen kulmaan. Tunnin kuluttua toiminnon valinnasta informaatio signaali huomauttaa hoitohenkilökuntaa/käyttäjää kasvavasta painehaavavariskistä.



**Kovetustoiminto** kovettaa kennoston hoitotoimenpiteiden ajaksi. Säätölaite palaa 30 min. kuluttua automaattisesti **Normaali**-toimintoon, mikäli muuta toimintoa ei ole valittu. **HUOM: Kun kennosto kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikkenevät.**



Ledit vasemmalta lukien: virtakaapeli kytketty, akkukäyttö, Bluetooth-yhteys.



# Pikakäyttöohje

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

**HUOM!** Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

## Esimerkki vianetsinnästä - Vuoto letkustossa tai sisäkennostossa

Tarkista ilmaletkut;  
katso irrotettava  
pikaohje

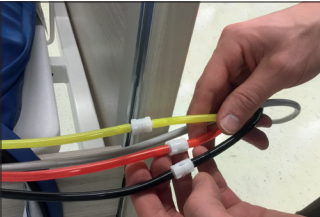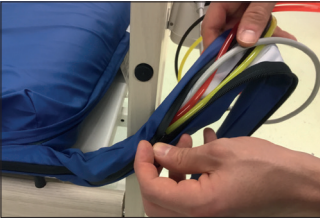

3 s.

1. Säätläite antaa äänisignaalin ja näyttöön tulee oheinen teksti. LED-valot palavat jonkin säättöalueen (osoitettu letkuja vastavalla väreillä) osalta oranssin sävyisinä.
2. Tarkista ensin onko säätläitteeseen kytkeytyvä Sixtube-liitin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiinnikkeissään.



Optima7080/Optima8590/OptimaBario



OptimaCot/OptimaJuve

3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätläitteen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastavuus (esimerkiksi musta mustaan).
4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asianmukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätietoja. Sulje tämän jälkeen letkusukka.
5. Kuittaa informaatio-signaali painamalla informaatio-signaalin kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan. Seuraa, että patjajärjestelmä säätyy valittuun toimintoon onnistuneesti.

Mikäli informaatio-signaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital®-huoltoon.

Arkisin klo 8.30-15.30, puh. 0306 40 40 45

carital®

PKOHJ-H1-01-FI-1.6-19032021