

Mega™ Grip TARRAKIINNITTEINEN TUKI- TYYYNY



Mega™Grip on hygieniapäällisellä varustettu tukityyny. Mega™Grip kiinnitetään tarralla halutun raajan ympärille.

Oikein suoritettuna asentohoidolla edistetään hengitystä ja verenkiertoa, estetään nivelten virheasentojen syntymistä sekä iho/kudosvaurioiden syntyä. Kuntoutumisen perustana on onnistunut asentohoitto.¹

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



YLEISKUVAUS

Mega™Grip on hygieniapäällisellä varustettu tukityyny. Mega™Grip kiinnitetään tarralla halutun raajan ympärille.

Kehon lämmön ja painon yhteisvaikutuksesta hitaasti muotoutuva, viskoelastinen EKO PU-geelivaaho tasaa kudospaineita*.

***KUDOSPAAINEEN TASAAMINEN =
antidecubitusominaisuus***

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on toimia apuna terveydenhoidon ammattihenkilön suunnittelemassa asentohoidossa.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Toimia asentohoidon tukena erilaisten kliinisten käyttöaiheiden tarpeen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten arvioimana ja ohjeistamana.

VASTA-AIHEET

Tukityynyä ei saa käyttää suorassa kosketuksessa mihinkään potilaan kehonsiin, joissa voidaan havaita painehaava.

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisumateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu yhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Vaahtomateriaalit ovat CertiPUR-sertifioituja. Tuotteen paloluokitus on SL 1.²



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Mega™ Grip TARRAKIINNITTEINEN TUKI- TYYNY



VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Vaahtosisus koostuu kahdesta, kiinteästi yhteen liimatusta, viskoelastisesta PU-geelivahtokerroksesta. Vaahtojen korkea tiheuspaino (50 kg/m³) takaa tuotteelle pitkän käyttöiän.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-³, lika- ja eritetiivistä⁴ PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁵. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁶. Päällisessä on tarranauhat.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



KOKO JA PAINO

Vakiokoko: 12 x 50 x 7 cm
Paino: 280 g

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYS- OHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuina on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta
- Tarrapinnat: -5000 avausta

Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

HOITO- JA PESUOHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyhinta ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyhinta pidentää tuotteen käyttöikä.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.

Huom! Vaahtosisukselle ei vesipesua!



LÄHTEET

¹Kilpinen S., Laine M. & Lehmonen T. Asentohoitoa asentohoitotyöryhmillä. 2016. Saatavilla: <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604134249>.

²Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastavaan mukaisesti.

³Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

⁴Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

⁵Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁶Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi