

# Pikakäyttöohje

NeolCU (NeoGiraffe) / NeolW

**HUOM!** Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

## ELVYTYSTILANTEESSA:

**Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.**



**Valmiustila**-näppäintä painamalla laite käynnistyy. Säätolaitte tarkistaa ensin kaikkien toimintojen tilan. Tarkistuksen jälkeen on 15 minuuttia aikaa valita oikea painoluokka. Painamalla näppäintä uudestaan laite sammuu huolimatta käynnissä olevasta toiminnosta.



**Näppäimistön lukitus ja avaus.** Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia yhtäjaksoisesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Painamalla yhtäjaksoisesti uudelleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu.



**Informaatio-signaalin kuittaustoiminnolla** sammutetaan laitteen informaatio-signaalit. **Äänisignaali kuittaautuu yhdellä painalluksella ja visuaaliset signaalit kolmen (3) sekunnin yhtäjaksoisella painalluksella.** Tutustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttöohjeessa. Pikakäyttöohjeen toisella puolella on esimerkki vianetsinnästä.

0-3 kg

Valitse painoluokka **0-3 kg** potilaalle, joka painaa 0-3 kg. Anna laitteen säätyä painoluokkaan **0-3 kg** ennen potilaan asettamista patjalle. Huom! Jos painoluokkaa ei valita 15 minuutin kuluessa, säätolaitte antaa informaatio-signaalin.

3-6 kg

Valitse painoluokka **3-6 kg** potilaalle, joka painaa 3-6 kg. Anna laitteen säätyä painoluokkaan **3-6 kg** ennen potilaan asettamista patjalle. Huom! Jos painoluokkaa ei valita 15 minuutin kuluessa, säätolaitte antaa informaatio-signaalin.



Ledit vasemmalta oikealle: **virtajohto kytketty, akkukäyttö, Bluetooth-yhteys.**


# Pikakäyttöohje

NeolCU (NeoGiraffe) / NeolW

**HUOM!** Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.


**Esimerkki vianetsinnästä - Vuoto letkustossa tai kennostossa**

Tarkista ilmaletkut;  
katso irrotettava  
pikaohje

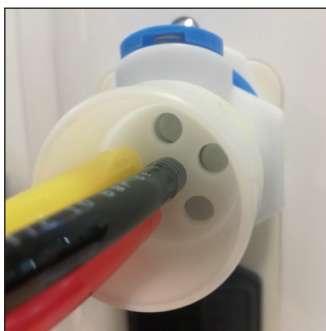

3 s.

1. Säätläite antaa äänisignaalin ja näyttöön tulee oheinen teksti. LED-valot palavat jonkin säätöalueen (osoitettu letkuja vastaavilla väreillä) osalta oranssin sävyisinä.
2. Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtube-liitin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiinnikkeissään.

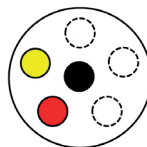

3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätölaitteen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastaavuus (esimerkiksi musta mustaan).
4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asianmukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätietoja. Sulje tämän jälkeen letkusukka.
5. Kuittaa informaatio-signaali painamalla informaatio-signaalin kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan. Seuraa, että patjajärjestelmä säättyä valittuun toimintoon onnistuneesti.

**Mikäli informaatio-signaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital®-huoltoon.**

Arkisin klo 8.30-15.30, puh. 0306 40 40 45

carital®

PKOHJ-H1-06-FI-1.0-02022022