



- Varmista, että virta on kytketty päälle pistorasiasta ja ohjauksyksikön sivusta virtajohdon vierestä.
- Tarkista, että ilmaletku on kiinnitetty oikein ohjauksyksikköön (Ilmaletkun päässä olevan vihreän pisteen tulisi näkyä ohjauksyksikön vastakappaleen pienestä reiästä), ja tarkista, että hätätyhjennysventtiili on täysin suljettu.
- Virran kytkemisen jälkeen järjestelmä näyttää ensin viestin KÄYNNISTETÄÄN ja sitten viestin ALUSTETAAN, kun patja täyttyy (tämä vie 15–20 minuuttia).
- Kun patja on täyttynyt, järjestelmä siirtyy oletusarvoisesti AKTIIVINEN -tilaan. Valitse JATKUVA ALHAINEN PAINE painamalla **HOITOTILA** -painiketta (katso alla). Mukavuusasetusta voidaan säätää nuolipainikkeilla (PEHMEÄ/PUOLIPEHMEÄ/NAPAKKA).
- Kun ohjauksyksikkö on käynnissä, se lukittuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua viimeisimmästä painikkeen käytöstä. Tämän tarkoituksena on estää painikkeiden tahaton käyttö (MYKISTÄ -painiketta lukuun ottamatta). Tämän osoittaa näytöllä näkyvä viesti "🔒". Jos haluat käyttää painikkeita (vaihtaaksesi hoitotilaa tai mukavuusasetusta), pidä **MYKISTÄ / POISTA LUKITUS** -painiketta painettuna, kunnes ohjauksyksikkö antaa merkkiään.
- Kun ilma halutaan poistaa patjasta järjestelmää purettaessa, käytä CPR-toimintoa edellä kuvatulla tavalla.
- Patjoja voidaan käyttää moottori-, säleikkö- ja kiinteissä sängyissä.
- Selkänojat tai tukityyny tulisi asettaa patjan alle, jotta vartalo on jatkuvassa kosketuksessa patjan pinnan kanssa. Pidä vuodevaatteet mahdollisimman vähäisinä potilaan alla, sillä ne voivat heikentää patjan painetta vähentäviä ominaisuuksia – löysä tasainen lakana on ihanteellinen.



**HOITOTILA:** Vaihda hoitotilasta AKTIIVINEN (1-in-4 vaihtuvapaineinen ilmanpainesykli) hoitotilaan JATKUVA ALHAINEN PAINE painamalla HOITOTILA -painiketta. Hoitotilan oletusasetus on AKTIIVINEN. Siirry JATKUVA ALHAINEN PAINE -tilaan painamalla HOITOTILA -painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään. Tämän jälkeen järjestelmä näyttää ODOTA, ja alustaminen vie noin 2 minuuttia.



**MUKAVUUSASETUS:** Mukavuusasetuksen automaattinen oletusasetus on PUOLPEHMEÄ. Jos potilas toivoo kovempaa tai pehmeämpää patjaa, voit nostaa tai laskea mukavuusasetusta nuolipainikkeilla (PEHMEÄ/PUOLPEHMEÄ/NAPAKKA). Mukavuusasetus näytetään näytössä. Tarkista säännöllisesti, että patja tukee potilasta ja on tälle mukava.



**TIEDOT:** Käytetään vain tietojen katseluun; ei vaikuta käyttötilaan - katso lisätietoja käyttöohjeesta.



**MYKISTÄ / POISTA LUKITUS:** Paina mykistääksesi äänimerkin ja poistaaksesi viestin näytöstä. Tämä painike avaa myös tehoyksikön lukituksen, kun näytössä näkyy "🔒" - pidä painiketta painettuna, kunnes tehoyksikkö antaa äänimerkin, jos painikkeen lisätoimintoja tarvitaan (eli mukavuusasetusta). Ohjauksyksikkö lukittuu uudelleen 2 minuuttia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.



**ENIMMÄISTÄYTTÖ:** Joissakin hoitotoimissa välttämätön ENIMMÄISTÄYTTÖ -tila täyttää patjan staattiseen enimmäispaineeseen 15 minuutin ajaksi. 15 minuutin kuluttua järjestelmä palaa automaattisesti AKTIIVINEN -tilaan.



**NFC (RFID):** Ohjauksyksikkö sisältää passiivisen NFC-tunnisteen, joka sisältää lisätietoa. Aseta yhteensopiva NFC-yhteensopiva laite, kuten älypuhelin tai tabletti, NFC-symbolin päälle näyttääksesi nämä tiedot.

**CPR (ELVYTYS) -TOIMINTO:** Kierrä hätätyhjennysventtiiliä vastapäivään, jotta se napsahtaa aivoimeen asentoon "🔒". CPR (elvytys) -laite sijaitsee patjan oikealla puolella olevassa päädössä (jalkopäästä katsottuna) patjan etiketin nuolien osoittamassa paikassa.

**POTILAAN SIIRTOTILA:** Täytä patja painamalla ENIMMÄISTÄYTTÖ -painiketta. Irrota patjan ilmaletku ohjauksyksiköstä kiertämällä patjan letkuliitintä vastapäivään, kunnes mustat viivat ovat kohdakkain, ja vedä patjaletkun liitin irti. Patja jää täytettyyn tilaan ja tukee potilasta.

**HUOLTO JA YLLÄPITO:** Huolehdi patjan suojuksen puhtaudesta niin hyvin kuin mahdollista. Päivittäiseen puhdistukseen suositellaan, että päälliset puhdistetaan kuumalla vedellä ja saippualla tai neutraalilla pesuaineella. Päälliset voidaan irrottaa ja pestä koneessa ja rumpukuivata korkeintaan 73°C. Hankaavia puhdistusaineita, fenolipohjaisia desinfiointiaineita, liuottimia tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita, kuten Dettol, Phenicol, Hibiscrub, Clearsol, Stericol tai Hycoline, ei saa käyttää, sillä nämä voivat vahingoittaa päällismateriaalia. Tarkasta patjan suojuksen ja sen sisäpuoli vaurioiden varalta.

**KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO:** QUATTRO Acute:- 250kg QUATTRO Plus:- 200kg




## KÄYTÖN KONTRAINDIKAATIOT

Aktiiviset makuualustat eivät sovellu potilaille, joilla on epävakaista murtumia, vakavaa turvotusta, palovammoja tai jotka eivät siedä liikettä.

## YLEISET VAROITUKSET, HUOMAUTUKSET JA TIEDOT

- Varmista, että virransyöttö vastaa ohjausyksikössä ilmoitettua tyyppiä.
- Tarkista virtajohto vaurioiden varalta ja varmista, että se ei ole esteenä tai aiheuta tapaturmaa kuten kuristumista.
- Varmista, ettei virtajohto tai ohjausyksikkö jää puristuksiin esimerkiksi kun vuodetta tai sen kaiteita nostetaan tai lasketaan tai kun muita liikkuvia esineitä siirretään.
- Ohjausyksikköä saa käyttää vain Direct Healthcare Group:in toimittaman sopivan virtajohdon kanssa.
- Älä käytä tulenarkojen anesteettien lähellä.
- Älä aseta laitetta lämmönlähteen päälle tai lähelle sitä.
- Älä käytä yhdessä kuumavesipullojen tai sähköpeittojen kanssa.
- Kaikki järjestelmän osien valmistuksessa käytetyt materiaalit ovat vaadittujen paloturvallisuusmääräysten mukaisia.
- Direct Healthcare Group suosittelee välttämään tupakointia sinä aikana, kun järjestelmä on käytössä. Näin estetään mahdollinen muiden syttyvien tuotteiden kuten liinavaatteiden tahaton syttyminen.
- Ei saa käyttää hapella rikastetussa ympäristössä.
- Väärän sulakkeen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.

## VIANETSINTÄTIEDOT

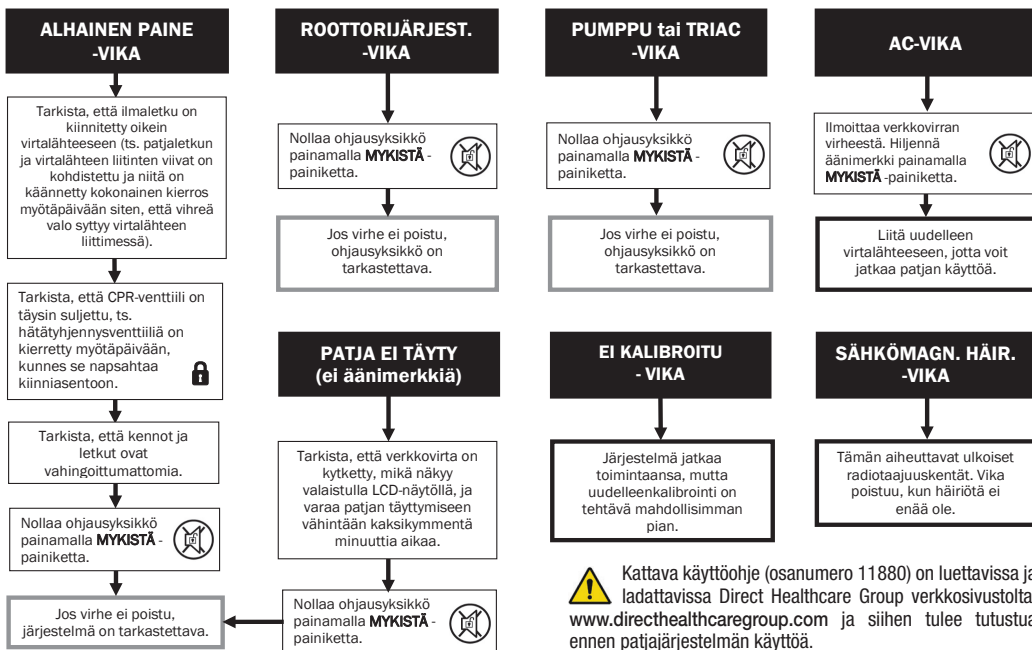

 Kattava käyttöohje (osanumero 11880) on luettavissa ja ladattavissa Direct Healthcare Group verkkosivustolta: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) ja siihen tulee tutustua ennen patjajärjestelmän käyttöä.