

Opas turvallisille nostoille

● ● ● ● ● ● ● ●
X X X S M L X X
X X S L X X
X S L X L
S L

Direct Healthcare Groupin nostoliinojen koot ovat välillä XXS–XXL. Pienimmät koot sopivat lapsille ja pienikokoisille aikuisille, suurimmat isokokoisille ja usein ylipainoisille potilaille. Asteikon kolme keskimäistä kokoa (Small, Medium ja Large) sopivat useimmille normaalkokoisille aikuisille. Lisäksi nostoliinojen valikoimassa on erikoismallit erittäin painaville ja isokokoisille potilaille koossa XXXL ja XXXXL. Kattavat tiedot kaikista eri materiaaleista valmistettavista nostoliinamalleista tuotenumeroineen ja mittoineen löydät verkkosivuiltamme.

Kaikki
nostoliinat =
SWL 300 kg







SupportScale	Erilliset reisu- tuet	Yhtenäinen reisu- tuki
Matala selkäosa	+	++
Hartioihin ulottuva selkäosa	++	+++
Korkea selkäosa	+++	++++



Malli/tuenta	Matala selkäosa +	Hartioihin ulottuva selkäosa ++	Korkea selkäosa ++++ / +++++	
Aukko/reisituet  Iso aukko erilliset reisituet	HygieneSling  Polyesteri, vyöllä Polyesteri, ilman vyötä Polyesteri, vyöllä ja selän lisätuella			
Vakio-aukko erilliset reisituet	LowBackSling  Polyesteri Polyesteriverkko	BasicSling  Polyesteri Polyesteriverkko	HighBackSling  Polyesteri Polyesteriverkko Muovitettu verkko Kertakäyttömateriaali ShellHBSling  Polyesteriverkko FlexibleSling  Polyesteriverkko	
Pieni aukko erilliset reisituet	HygieneLBSling  Polyesteri	AmpSling  Polyesteri Polyesteri verkko	HygieneHBSling  Polyesteri AmpHBSling 	
Yhtenäinen reisituki hygienia-aukolla		ClassicSling  Polyesteriverkko	ClassicHBSling  Polyesteriverkko FlexibleSling, undivided  FlexibleSling, undivided hygienia-aukolla 	
Seisominen/ Käveleminen	StandingVest  Polyesteri	WalkingVest  Polyesteri	BariVest  Polyesteri • + XXXXL Valmistaja Direct Healthcare Group Sverige AB Torshamnsgatan 35 164 40 Kista Sweden www.directhealthcaregroup.com Jakelija Suomessa MediMattress Oy Haukilahdenkatu 4 00550 Helsinki p. 0306 404040 asiakaspalvelu@medimattress.fi www.medimattress.fi	DHG Moving Health Forward  Parempaan hoitoon OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

Nostoliinojen kokotaulukko

- Kullekin nostettavalle parhaiten sopiva nostoliinan malli, koko ja materiaali on aina selvitettävä sovittamalla.
- Kokotaulukon mitat ja suositukset on tarkoitettu ainoastaan valintaa helpottaviksi viitetiedoiksi.
- Nostoliinan istuinleveys antaa osviittaa nostettavan lantion leveydestä (lonkkaluiden etuosan väli), jolle tuote sopii. Nostettavan lantion leveyden tulee olla nostoliinan istuinleveys +/- 5 cm.
- Nostoliina on liian suuri, jos nostettavan takapuoli luistaa alaosan aukosta liian pitkälle tai reisuudet luistavat kohti nostettavan polvitaiteita.
- Nostoliina on liian pieni, jos nostettavan kasvot ovat liian lähellä nostokaarta, reisuudet hirtävät haaroista tai nostoliina näyttää tai tuntuu ahtaalta.

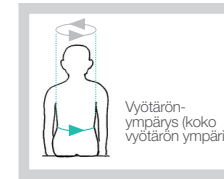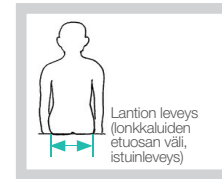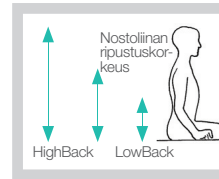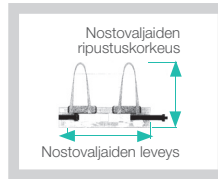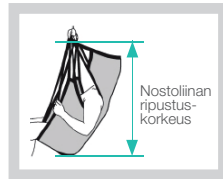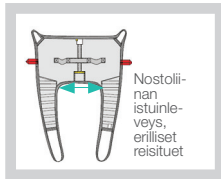

Erilliset reisuudet / Korkea selkäosa



Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
40800002	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyesteri	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyesteri	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyesteri	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm

Erilliset reisu- / Korkea selkäosa (jatkoa edelliseltä sivulta)

	Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
	40822002	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
	40822003	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
	40822004	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
	40822006	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
	40822007	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
	40822008	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
	40822009	HighBackSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
	40852002	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
	40852003	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
	40852004	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
	40852006	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
	40852007	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
	40852008	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
	40852009	HighBackSling	muovitettu verkko	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
	40890004	HighBackSling	kertakäyttömateriaali, <i>kuitukangas</i>	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
	40890006	HighBackSling	kertakäyttömateriaali, <i>kuitukangas</i>	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
	40890007	HighBackSling	kertakäyttömateriaali, <i>kuitukangas</i>	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
	40890008	HighBackSling	kertakäyttömateriaali, <i>kuitukangas</i>	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
	40890009	HighBackSling	kertakäyttömateriaali, <i>kuitukangas</i>	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
	40700002	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
	40700003	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
	40700004	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
	40700006	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
	40700007	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
	40700008	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
	40700009	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
	42520002	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
	42520003	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
	42520004	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
	42520006	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
	42520007	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
	42520008	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
	42522002	FlexibleSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
	42522003	FlexibleSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
	42522004	FlexibleSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
	42522006	FlexibleSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
	42522007	FlexibleSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
	42522008	FlexibleSling	polyesteriverkko, <i>ei reisu- / ei selkää</i>	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
	42800004	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
	42800006	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
	42800007	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
	42800008	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm

Erilliset reisituet / Hartioihin ulottuva selkäosa

	Tuotenro	Tuotenimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
	40500002	BasicSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
	40500003	BasicSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
	40500004	BasicSling	polyesteri	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
	40500006	BasicSling	polyesteri	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
	40500007	BasicSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
	40500008	BasicSling	polyesteri	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
	40500009	BasicSling	polyesteri	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
	40520002	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
	40520003	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
	40520004	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
	40520006	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
	40520007	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
	40520008	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
	40520009	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
	40522002	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
	40522003	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
	40522004	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
	40522006	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
	40522007	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
	40522008	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
	40522009	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahvikkeita	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
	42700003	AmpSling	polyesteri	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
	42700004	AmpSling	polyesteri	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
	42700006	AmpSling	polyesteri	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
	42700007	AmpSling	polyesteri	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
	42700008	AmpSling	polyesteri	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
	42700009	AmpSling	polyesteri	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
	42720003	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
	42720004	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
	42720006	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
	42720007	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
	42720008	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
	42720009	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm

Erilliset reisituet / Matala selkäosa

	Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
	40200002	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
	40200003	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
	40200004	LowBackSling	polyesteri	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
	40200006	LowBackSling	polyesteri	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
	40200007	LowBackSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
	40200008	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
	40200009	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

Erilliset reisu- / Matala selkäosa (jatkoa edelliseltä sivulta)



Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
40220002	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

Yhtenäinen reisu- / Korkea ja hartioihin ulottuva selkäosa



Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
42521003	FlexibleSling, undevided	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, undevided	polyesteriverkko	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, undevided	polyesteriverkko	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, undevided	polyesteriverkko	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, undevided	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	polyesteri	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	polyesteri	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-

WC-käynteihin / Korkea ja hartioihin ulottuva selkäosa



Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
43704002	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, undevided*	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, undevided*	polyesteriverkko	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, undevided*	polyesteriverkko	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, undevided*	polyesteriverkko	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, undevided*	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm

*) hygienia-aukollinen



WC-käynteihin / Korkea ja hartioihin ulottuva selkäosa (jatkoa edelliseltä sivulta)

Tuotenro	Tuotteen nimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
41221404	ClassicSling, <i>hygienia-aukko</i>	polyesteriverkko	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling, <i>hygienia-aukko</i>	polyesteriverkko	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling, <i>hygienia-aukko</i>	polyesteriverkko	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

WC-käynteihin / Matala selkäosa



Tuotenro	Tuotenimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostoliinan istuinlev.	Nostoliinan ripustuskork.
43504002	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyesteri, <i>vyö</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm



43604002	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyesteri, <i>ei vyötä</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm



43904003	HygieneSling	polyesteri, <i>lisätuki selälle</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyesteri, <i>lisätuki selälle</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyesteri, <i>lisätuki selälle</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyesteri, <i>lisätuki selälle</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyesteri, <i>lisätuki selälle</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm



43804002	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

Vaakatason nostot / Kääntäminen



Tuotenro	Tuotenimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Pituus	Leveys
46502007	StretcherSling	polyesteri	300 kg	yksi koko	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	kertakäyttömateriaali, <i>kuitukangas</i>	300 kg	yksi koko	50-200 kg	180 cm	86 cm



47522007	SafeHandlingSheet	polyesteriverkko	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	polyesteriverkko / WendyLett4Way	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyesteri	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyesteri, <i>vahvistettu</i>	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm



547810	PositioningSling	kertakäytt. mat., <i>kuitukangas, polyesteri</i>	454 kg	yksi koko	50-400 kg	198 cm	132 cm
--------	------------------	--	--------	-----------	-----------	--------	--------

Vaakatason nostot / Kääntäminen (jatkoa edelliseltä sivulta)



Tuotenro	Tuotenimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Pituus	Leveys
49592000	TurningSling, 2 nostolenkkiä	kertakäyttömateriaali, kuitukangas	250 kg	yksi koko	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, 2 nostolenkkiä	kertakäyttömateriaali, kuitukangas	250 kg	yksi koko	50-250 kg	-	-

Seisomaannousu / Seisominen MiniLift-nostimen avulla



Tuotenro	Tuotenimi	Materiaali / Kuvaus	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostovaljaiden leveys
45500003	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm



45600004	ThoraxSling	polyesteri, istumatuki	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyesteri, istumatuki	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyesteri, istumatuki	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyesteri, istumatuki	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm



45690004	ThoraxSling	kertakäyttömateriaali, kuitukangas, istumatuki	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	kertakäyttömateriaali, kuitukangas, istumatuki	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	kertakäyttömateriaali, kuitukangas, istumatuki	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	kertakäyttömateriaali, kuitukangas, istumatuki	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

Seisominen / Kävely



Tuotenro	Tuotenimi	Materiaali	Suurin kuorma	Koko	Nostettavan suos. paino	Nostovaljaiden leveys	Nostovaljaiden ripustuskork.
44503003	StandingVest	polyesteri	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyesteri	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyesteri	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyesteri	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyesteri	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm



44200002	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyesteri	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyesteri	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm



47103010	BariVest	polyesteri	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	polyesteri	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-