

Pro™ Tuoli ERIKOISVAHVA NOJATUOLI



Kovaa kulutusta kestävä nojatuoli vaativiin olosuhteisiin.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



YLEISKUVAUS

Tuote on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa kalusteilta ja materiaaleilta vaaditaan kovaa kulutuskestoa ja repimiskestävyyttä. Ulkopäällinen ovat liukasta ja vahvaa kangasta, jota on vaikea rikkoa paljain käsin.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuoli psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaaviin vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöihin.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääikinnällisen laitteen potilaalle ja kyseen hoitoilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Potilasturvallisuuden ja hoitajien työturvallisuuden parantamiseksi kehitettyjä Pro™-tuotteita käytetään psykiatrisilla osastoilla ja muissa vaativissa hoito-olosuhteissa levottomien ja/tai aggressiivisten potilaiden hoitoon. Tuotteet on suunniteltu ja testattu asiantuntijoiden kanssa soveltuvaksi erityshuoneiden kaltaisiin olosuhteisiin.

VASTA-AIHEET

Ei tunnettuja kontraindikaatioita.

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääikinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisumateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi ISO 10993-1:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL1¹.

Huom! Tuote ei kestä puremista tai teräviä esineitä.

Huom! Varmista aina ennen tuotteen käyttöä, että potilaalla ei ole hallussaan teräviä esineitä tai tulentekovälineitä. Valvomaton terävien esineiden tai tulentekovälineiden tahallinen käyttö tuotteisiin voivat vaurioittaa päällisiä ja altistaa tuotteen sisuksen kontaminoitumiselle ja vaurioitumiselle tai aiheuttaa tulipalovaaran.

TAKUU

Pro™-tuotteilla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaaliavirheistä tai valmistuksesta.



VALMISTAJA / MYyntI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Pro™ Tuoli ERIKOISVAHVA NOJATUOLI


VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Tuoli koostuu useista kiinteästi yhteen liimatuista vaahtomuovikerroksista. Istuinpinnassa on viskoelastista PU-geelivaahtoa, muut kerrokset ovat PU-kimmo- ja tukivaahtoa.




ULKOPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Ulkopäällisen materiaali on erittäin liukasta ja kovaa kulutusta kestävää erikoistekstiiliä (sisäpuolelta PU-sivelty polyesteri). Päällisen kolmella sivulla on pitkällä vetimen suojakanavalla varustettu vetoketju, joka ei ole avattavissa ilman erikoistyökalua.

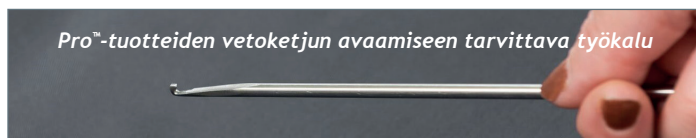

OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

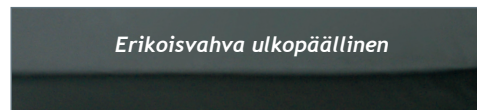

SISÄPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Sisäpäällisen materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritetiivistä³ PU-laminoitua polyesteriä. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁴. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁵. Sisäpäällisessä on ommellut saumat ja tippasuojallinen perinteinen vetoketju kolmella sivulla.



KOKO JA PAINO

leveys 63 cm
syvyys 90 cm, istuinsyvyys 55 cm
korkeus 120 cm
paino n. 23,5 kg

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttö-tarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- Pehmusetut kalusteiden sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset ja vastaavat rakenteet: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energijakeena tai sekajäteisiin.



HOITO-OHJE

Päällisten pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioidulla pesuliuoksella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, etanoliliuokset max. 60-80 % (pH=10). Vältettävä syövyttäviä tehoaineita. Syövyttäviä tehoaineita käytettäessä aina huuhdelupyyhintä puhtaalla vedellä ja kuivaus.

Mikäli pintamateriaalit altistuvat pitkäaikaisesti urealle (hiki ja virtsa), voi polyuretaanin molekyyli-rakenne rikkoutua vaurioittaen materiaaleja. Puhdista urealle altistunut tuote välittömästi.

Päälliset voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Avaa vetoketjut ja käännä päälliset tekstiilipuolet ulospäin. Kuumadesinfiointisuositus 70 °C 10 min. Max. pesulämpötila 95 °C. Ripustuskuivaus (tai 1-pisteen rumpukuivaus pesupussissa). Varmista, että päälliset ovat täysin kuivia ennen käyttöönottoa.

Vaahtosisukselle ei vesipesua!



LÄHTEET

¹ Vastaava kangas/vaahtorakenne testattu IMO 2010 FTPC ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti.

² Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

³ Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti.

⁴ Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁵ Aktiivinen ainesosa sinkkipyritiini.

VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi