

Mediresc™ kiinteä pelastuspäällinen



Mediresc™-pelastuspäällinen kiinteällä pelastuslakanominaisuudella on saatavilla kaikkiin MediMattress Oy:n valmistamiin täyspatjoihin.

Pelastuspäälliset ja -lakanat on suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa

YLEISKUVAUS

Kiinteä Mediresc™-pelastuspäällinen on suunniteltu potilaan nopeaa evakointia varten esimerkiksi tulipalon sattuessa. Mediresc™-pelastuspäällinen mahdollistaa potilaan turvallisen evakuoinnin niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa.

Sinisen pintakankaan ylin kerros on polyuretaania ja alakerros polyesteriä. Mustan pohjakankaan pinta on liukasta polyesteriä ja sisäkerros polyuretaania.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

TUOTETURVALLISUUS

Mediresc™ käytetään osana Lääkintälaitteasetuksen 2017/745 (MDR) mukaisia lääkinnällisiä laitteita (MediMattress täyspatjat). Päällismateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteesopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.¹

OMINAISUUDET

Päällisen yläosan materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritietivistä³ PU-laminoitua polyesteria. Yläosan materiaalilla on korkea hankaus- ja kulumkestävyys⁴. Pelastuspäällisen alaosa on erittäin liukasta, kestävä ja nesteitä läpäisemätöntä erikoistekstiiliä. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁵.

VARIANTIT

Mediresc™ (vakiomalli)
Mediresc™ NT (nestetiivis vetoketju)
Mediresc™ AS (antistaattinen pintakangas)

KOOT JA PAINO

Vakiokoot vaahtomuovipatjat:
75-78-80-85-88-90 x 200 x 13-17 cm,
78-88 x 205 x 13-17 cm, 70-80 x 160 x 13 cm
Vakiokoot Carital®-patjat:
70-75-80-85-90 x 200-210-220-230 x 13 cm

Paino n. 1,5 kg.

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttö-tarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- päälliset: viisi (5) vuotta

Voidaan hävittää energijakeena tai sekajätteisiin.



TAKUU

Tuotteilla on kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta. Tarkemmat takuehdot valmistajalta. Ota yhteyttä takuuasioissa tuotteen myyjään.

HOITO-OHJE

Päällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuoksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelu-pyyhintä ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikä.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.



LÄHTEET

¹Testattu EN 597-1&2 sekä IMO 2010 FTCP ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti.

²Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

³Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti.

⁴Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁵Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Medi**resc**TM

kiinteä pelastuspäällinen



KÄYTTÖ

Evakuointitilanteessa potilas kiinnitetään patjaan reunoista vedettävillä, pikalukollisilla hihnoilla (kuva 2). Punaisella huomiovärillä merkityt kiinnityshihnat on taiteltu omaan, vetoketjulliseen taskuunsa tippaläpän alle, joten ylimääräisiä hihnoja ei roiku patjan sivuilla tai alla. Hihnojen punaiset päät jäävät vetoketjutaskun ulkopuolelle, josta ne on helppo huomata ja vetää esiin (kuva 3).

Evakuointitilanteessa kiinnityshihnat (2 paria) vedetään esiin patjan sivuilta (kuva 2) ja potilas kiinnitetään patjaan. Hihnoissa on säädettävät, helposti ja nopeasti kiinnitettävät pikalukot.


Kun potilas on kiinnitetty patjaan, hänet voidaan siirtää turvalisästi vetäen pelastuspäällisen päädyn tukevista ja kestävästä vetohihnoista (kuva 4). Evakuointi onnistuu fyysisten mahdollisuuksien mukaan yhden henkilön voimin, myös portaissa.

Vetohihnat on laskostettu päällisen tippaläpän alle (kuva 5). Vetohihnat kiinnittyvät leveysuuntaisesti patjan nurkkiin.



Kuva 1. Patjan käsittelyä helpottavat kahvat.

Huom! Medi**resc**TM-päällisen sivukahvat (kuva 1) on tarkoitettu käytettäväksi vain makuualustan yleiseen käsittelyyn ilman potilaskuormaa. Tämän määräyksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kahvojen rikkoutumisen ja johtaa potilaan tai hoitavan henkilön loukkaantumiseen.

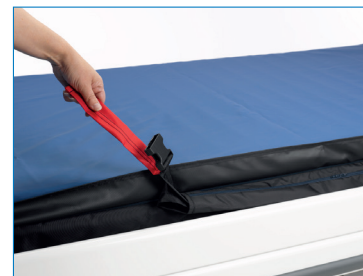

Kuva 2. Kiinnityshihnan esiin vetäminen.



Kuva 3. Kiinnityshihnan punainen pää.



Kuva 4. Vetohihna.



Kuva 5. Laskostettu vetohihna.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
 Haukilahdenkatu 4
 00550 Helsinki
 p. 0306 40 40 40
 asiakaspalvelu@medimattress.fi
 tilaus@medimattress.fi
 www.medimattress.fi